


# WARUM FEHLT DAS BVDV-PROBENERGEBNIS?

So darf es nicht sein!


So ist es richtig!

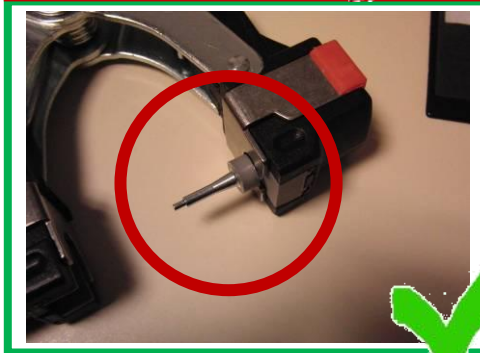


Auf den Dorn der Ohrmarkenzange muss der graue Ring aufgesteckt sein!




Es muss die Ohrmarkenzange der Firma Caisley verwendet werden!

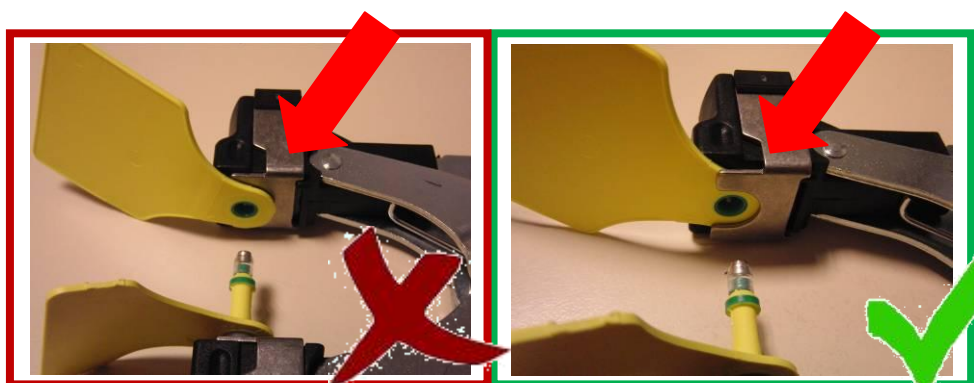

Das Rückteil der Ohrmarke muss hinter der Halterung in der Zange eingespannt sein!

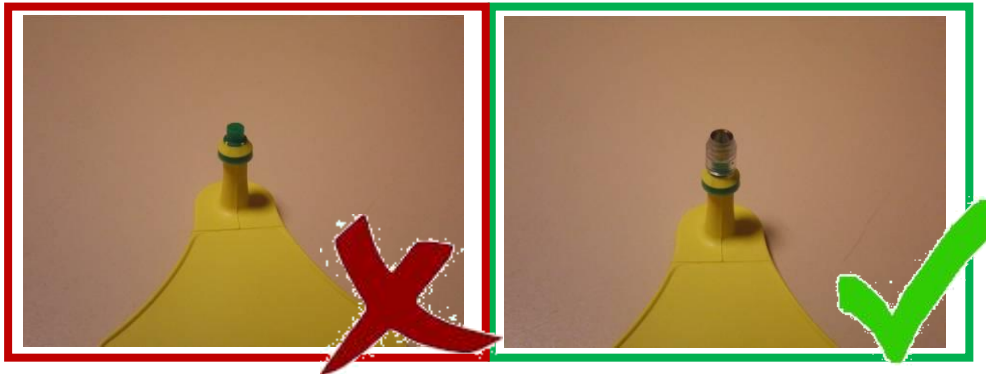

Der graue Schneidring muss auf das Dornteil der Ohrmarkenstanze aufgesetzt sein!

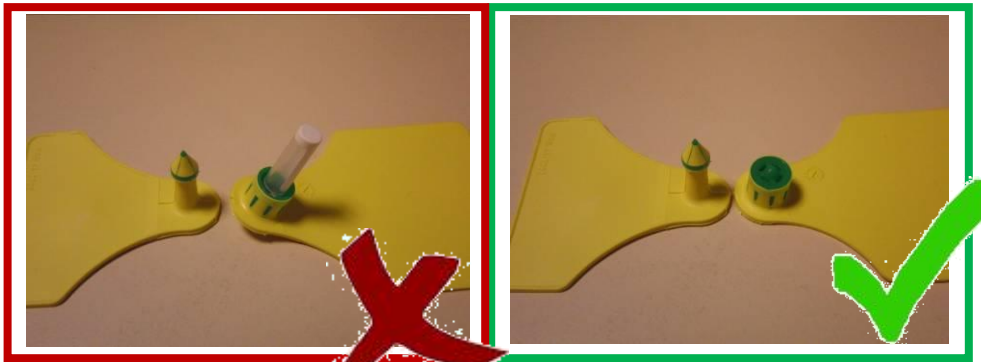

Zum jeweiligen Rückteil muss das korrekte Dornteil der Ohrmarke verwendet werden!



Zum Versand der Probenröhrchen sollten die weißen Versandumschläge verwendet werden. Werden die Proben in „normalen“ Umschlägen ins Labor geschickt, werden die Proben aus den Umschlägen rausgedrückt und die Umschläge kommen in der Regel leer im Labor an!